


MŰANYAG ORRCSIPESZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

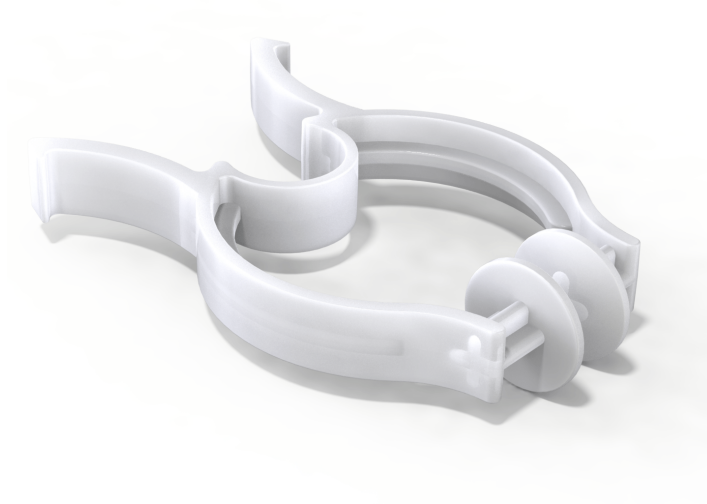

Termék leírása:

Az eldobható orrcsipesz megakadályozza, hogy levegő szivároгjon ki a páciens orrából a spirometriás, vagy a tüdőfunkciós teszt során, így a legpontosabb és legelfogadhatóbb vizsgálat végezhető segítségével. Az orrcsipesz testének feszültsége révén szilárdan, és csúszásmentesen tartja zárva az orrnyílásokat.

Jellemzők:

- Csak egyszeri használatra.
- A legtöbb orrmérethez passzol.
- Csúszásmentes

Használata:

Nyomja össze a felső két fület, és helyezze az orrcsipeszt a beteg orrára úgy, hogy a két orrnyílást teljesen elzárja.

Figyelmeztetések:

- Kisgyermek kezébe nem kerülhet, mert kis mérete miatt lenyelheti
- Ne használja, ha sérülést, repedést talál rajta
- Az orrcsipesz egyszer használatos, ne használja másik betegen
- Használat után az orrcsipeszt kezelje veszélyes hulladékként

Anyaga: hőre lágyuló műanyag